

EMBALLAGE DES ÉCHANTILLONS

Quoi faire et ne pas faire ?

Laboratoire Demeter — Guide de transport sécuritaire des échantillons

PRINCIPES FONDAMENTAUX – LE TRIPLE EMBALLAGE

Tout envoi d'échantillons biologiques doit respecter le principe du **triple emballage** :


- ① **Récipient primaire étanche** — tube adéquat, propre, bien fermé, pas trop rempli et bien identifié, qui contient l'échantillon.
- ② **Emballage secondaire étanche** — regroupe les récipients primaires, avec du matériau absorbant suffisant pour absorber tout le liquide en cas de bris.
- ③ **Emballage extérieur rigide et solide** — isolé, assez robuste et comblé par du matériel de remplissage pour protéger le contenu durant le transport. Ajouter un réfrigérant (*ice pack*) à l'extérieur de l'emballage secondaire, jamais en contact direct avec les tubes.

À respecter également :

- Placer le formulaire de soumission entre l'emballage secondaire et l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité (idéalement dans un sac refermable de style Ziploc).
- Il incombe à l'expéditeur de classer correctement ses échantillons et de se conformer à la réglementation en vigueur. Pour les exigences réglementaires complètes et à jour sur l'emballage et l'expédition des matières infectieuses (UN3373, catégorie B — instruction P650), consultez Transport Canada : <https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/materiel-sensibilisation-faq/industrie/expédition-matieres-infectieuses>

✗ À NE PAS FAIRE


CONTENANTS INAPPROPRIÉS

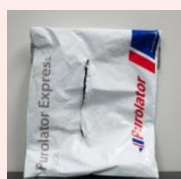

Sac



Glacière sans boîte

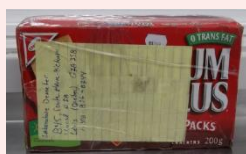

Boîte peu solide




Boîte trop grosse



Isolant à l'envers

✓ À FAIRE

CONTENANT APPROPRIÉ

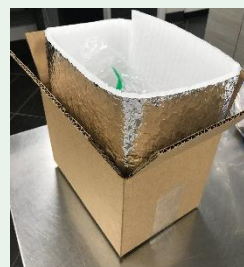


Boîte solide et bien ajustée à son contenu



Isolant à l'endroit

Des kits d'expédition contenant 6 boîtes solides 6"X6"X9", les isolants pré-coupés et les sacs réfrigérants sont disponibles gratuitement¹ à la pharmacie : MAT0147


RÉCIPIENT PRIMAIRE : REMPLISSAGE

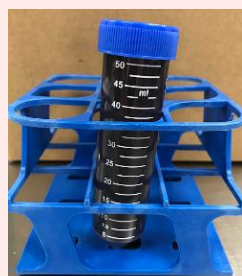

Tube rempli à ras bord



Pas assez de sang prélevé

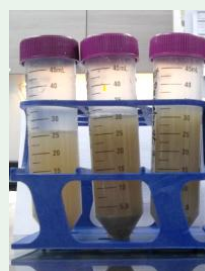

Tube rempli aux ¾ ou moins



Volume suffisant de sang prélevé

¹ Le kit d'expédition est gratuit s'il est utilisé pour expédier des échantillons à notre laboratoire. Des frais pour l'expédition du kit pourraient vous être chargés si commandé seul. Demeter paiera les frais de livraison des échantillons à notre laboratoire pour les commandes de tests de 100\$ ou plus provenant du Québec et de l'Ontario et pour les commandes de tests de 200\$ ou plus provenant des autres provinces.

✓ À FAIRE


RÉCIPIENT PRIMAIRE : UTILISER UN CONTENANT ADÉQUAT ET PROPRE



*Liquide, fèces ou tissus dans un sac,
un gant, ou un tube sous vide²*



*Tubes sales
ou tachés de sang*

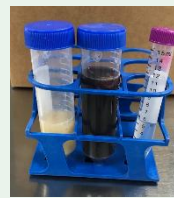

*Liquide dans
un tube vissé*
15 ml = MAT1071 (1 un.)
50 ml = MAT2528 (1 x 25 un.)



Tissu dans un Whirl-Pak



Tubes de sang propres

SÉCURITÉ DES TUBES DANS LA BOÎTE



Tubes nus placés directement dans la boîte / libres de se déplacer, se casser



*Tubes dans un sac étanche avec absorbant,
vide comblé de matériel de remplissage*

IDENTIFICATION DES TUBES



*Crayon qui s'efface
à l'humidité*



Écriture illisible



Encre indélébile testée, écriture lisible

LE FORMULAIRE DE SOUMISSION

Toujours joindre un formulaire bien complété comprenant, au minimum :

- ①. Le nom de la ferme
- ②. La date de prélèvement
- ③. Le type d'échantillon soumis
- ④. Les identifiants des échantillons
- ⑤. Les tests à faire, incluant les détails sur les pools, s'il y a lieu

Nos formulaires à jour sont toujours disponibles sur :
www.demetersv.com/laboratoire

⚠ IMPORTANT

Demandez à votre vétérinaire si vous n'êtes pas certain des tests à faire. Des délais supplémentaires sont à prévoir si nous n'avons pas toutes les informations à l'arrivée des échantillons au laboratoire.

FORMULAIRE DE SOUMISSION - PORCS

[illegible]

² Les tubes de prélèvement sous vide (VACUETTE®, BD Vacutainer®) doivent être remplis à l'aide d'une aiguille de prélèvement (prélèvement veineux) — jamais ouverts manuellement. Ouvrir le tube compromet l'étanchéité et le vide, ce qui entraîne un risque de fuite du contenu lors du transport. Pour tout autre liquide que le sang (ex. : salive, fluides de castration), utiliser un tube à bouchon vissé.